


入れ歯をご使用されている皆様へ


良い入れ歯は、健康的で明るい生活につながります。
食事や、人前で笑うことも楽しくなってきます。

そんな入れ歯を永く愛用するには、
入れ歯のお手入れがとても重要です。

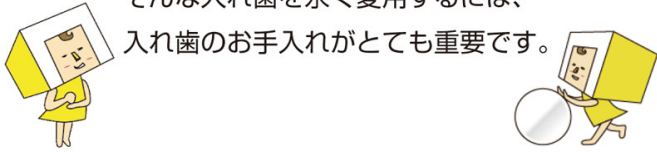

もし入れ歯を汚れたまま使っていると…


不衛生な入れ歯を使い続けていると、
デンチャープラークの影響で様々な悪影響を引き起こします。

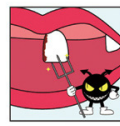

虫歯の原因



口臭の原因

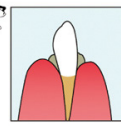

歯周病の原因



肺炎の原因

そんな不安も入れ歯洗浄剤を使えば、簡単に解決できます。


フィジオクリーン キラリ錠剤

入れ歯、
あんしん、
スツキリ、
キラリ。



キラリのヒミツを紹介します。

キレイのヒミツ。

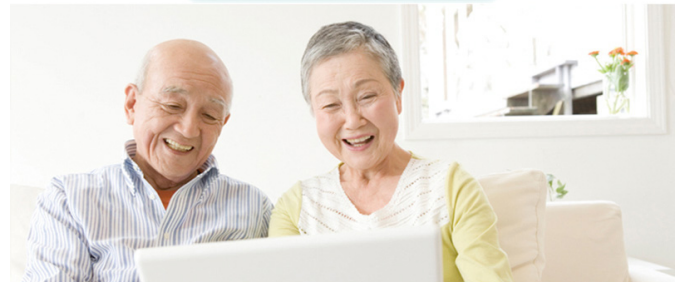

細菌へすぐれた除菌効果を発揮します。
コーヒーの汚れやタバコのヤニをきれいに落とします。

爽やかなのヒミツ。



キラリは汚れはもちろん、
あの嫌なヌルヌルしたヌメリまですっきり落とします。

おいしい食事のヒミツ。




キラリは無香料です。洗浄後すぐのお食事もおいしく楽しんでいただくことができます。

使い方かんたん。

- ぬるま湯約150mLに1錠入れる
 - 30分以上浸けおき洗い
 - ブラシなどを用い水でよくすすぐ
- 1 専用容器(別売)の使用がより効果的です。
- 2 一晩浸けておくと、より効果的です。
- 3 金属部分はよくすすいでください。

寝ている間に洗浄出来るので、とっても簡単です。

フィジオクリーン キラリ錠剤

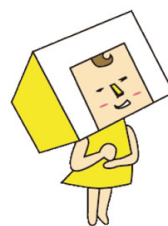

■標準価格
30包入(3g×30)
945円(税込)



詳しくはスタッフまでお尋ねください。