

# エアーベッツDC53 取り扱い方法

**コントロール部**

**電源スイッチ**  
スイッチをONにしてください。

3wayシリンジの空気量を設定します。

エアハンドピースの回転数を設定します。

モーターハンドピースの回転数を設定します。出力を設定します。

3wayシリンジの水量を設定します。

エアハンドピースの水量を設定します。

超音波スケーラの水量を設定します。

モーターハンドピースの水量を設定します。

**バキューム**  
付属のノズルを取り付けてください。ホルダから外すと自動的に吸引を開始します。  
**強** ↑ 弱 ↓

**3Wayシリンジ**  
シリンジノズルを取り付けてください。ボタンを押すと、水、空気がでます。同時に押すと霧状に出すことができます。  
水ボタン エアーボタン  
シリンジノズル

**モーターハンドピース用コネクタ**  
モーターハンドピースを取り付けてください。主に歯面の清掃、研磨に使用します。

**エアハンドピース用コネクタ**  
エアーハンドピースを取り付けてください。主に歯牙の切削に使用します。

**超音波スケーラ**  
スケーラハンドピースを取り付けてください。チップは付属のトルクレンチを使って取り付けてください。

それぞれのハンドピースはホースで本体と接続しています。

**本体**

**吸気穴**  
冷却用の空気を取り込みます

**給水スイッチ**  
ONで給水ボトルから水が供給されます。給水ボトルを外すときは、OFFにしてください。  
手前 OFF 奥 ON

**給水ボトル**  
各ハンドピースに水を供給します。ボトルに水を半分以上入れてください。  
ボトル内に給水フィルタがあります

**ドレインスイッチ**  
使用後に、レバーを上げてタンク内の空気及び水を抜きます。  
手前 治療後 奥 治療中

**ボトル部分**

**排水ボトル**  
バキュームで吸引した水を溜めます。空のボトルを取り付けてください。  
ボトル内にフロートスイッチがあります

**背面**

**AC電源インレット**  
電源コードを接続します。片側はコンセントに差し込んでください。


# ご使用後のお手入れ

製品を安全にお使いいただくため、ご使用後にはお手入れを行ってください。

## 1、ハンドピースのお手入れ (毎処置)

### A、エアハンドピースへ注油

エアハンドピースを本体から取り外します。

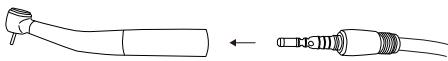


洗浄スプレーにチップノズルを装着します。  
ハンドピースに注油アダプタを取り付け、  
スプレーをしてください。



### B、モーターハンドピースへ注油

モーターハンドピースを本体から取り外します。

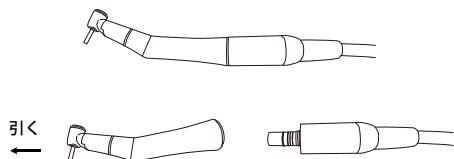

ハンドピースに注油アダプタを取り付け、  
スプレーをしてください。



注) 注油後、油が垂れでてきますので、数分間ハンドピースを  
立てかけておくか本体を振って油が垂れなくなつてから  
ホースに接続して下さい。

### C、超音波スケーラハンドピース及び スケーラコネクタの洗浄

電源スイッチをOFFにし、電源コードをコンセントから  
抜いてください。ハンドピースを本体から取り外します。



3-Wayシリンジのスプレーでコネクタに着いた汚れを落として  
ください。汚れが落ちにくい場合は、柔らかいブラシで優しく  
磨いてください。



洗浄ブラシは毛の部分が直径2~3mmで  
樹脂のものをお使い下さい(歯間ブラシ等)。

洗浄後しっかりと水分をとってください。


## 2、バキュームラインのお手入れ (毎回)

### A、バキュームラインの洗浄

バキュームで水を500ml吸引します。



排水ボトルの汚水を捨てて、洗浄します。  
フロートスイッチを洗浄します。

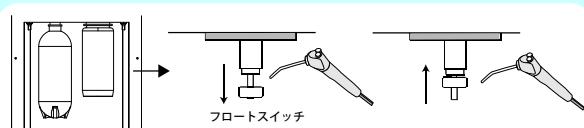


## 3、水抜き (毎回)

### A、水抜き

給水ボトルを空にします。  
ハンドピースに残った水をすべて抜きます。

空の給水ボトルを取り付けて、  
給水スイッチをONにしてください。  
電源スイッチをONにしてください。

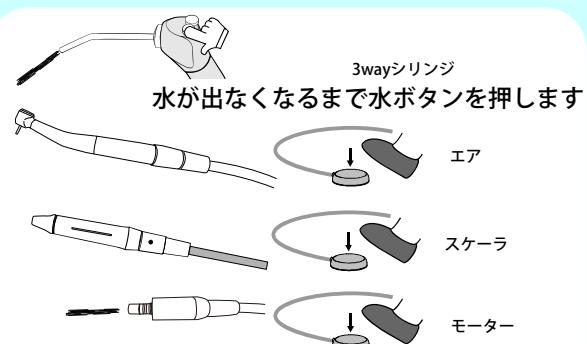


エア、スケーラのハンドピースを手で持ち、  
モーターはハンドピースを外し、  
水が出なくなるまでフットスイッチを踏みます  
1つずつ順に水抜きします

## 4、最後に (毎回)

### A、本体の空気抜き

電源スイッチをOFFにして、  
ドレインスイッチのレバーを上げてください。

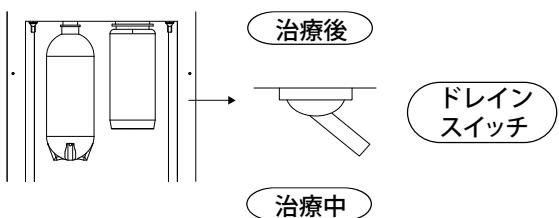

本体の下部から床に排気します。  
「ふしゅー」という空気が抜ける大きな音がします。


空気が出なくなることを確認します。

### B、本体の清掃

本体とコンセントから、電源ケーブルを抜きます。

本体の表面を清掃します。

本体の左右にある冷却用吸気穴の埃を取り除きます。

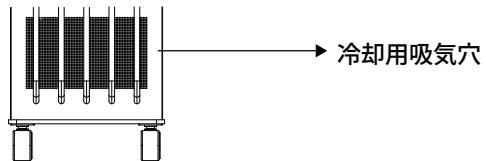


DC53本体取扱説明書は、以下のQRコードより  
ご参照ください。




## 5、給水ラインのお手入れ (3ヶ月)

### A、給水ラインの洗浄

ハンドピース、ノズルを本体から取り外します。

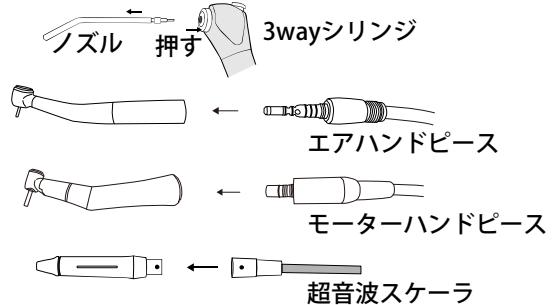

クエン酸水(電気ポットの洗浄に使用する濃度)を給水ボトルに約半分入れ、各ハンドピースから10秒以上水を出して、10~20分放置します。  
その後、通常の水で各ハンドピースそれぞれ給水ボトル1本分の水でクエン酸水と汚れを流します。  
流し終わったら「2、水抜き」の手順を行って下さい。

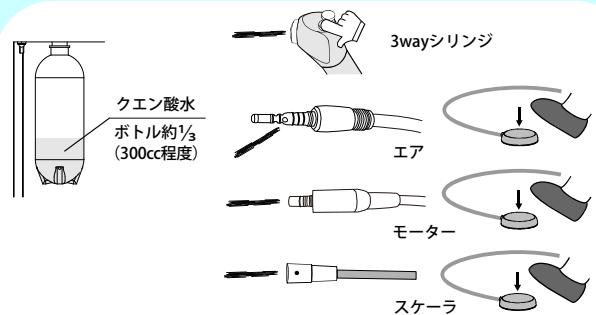

↓  
10~20分放置  
その後  
各ハンドピースそれぞれ  
給水ボトル1本分の水で  
クエン酸水と汚れを流す

