

エアベッツDC52 取り扱い方法

コントロール部

電源スイッチ

スイッチをONにしてください。

消灯  POWER OFF

点灯  POWER ON

3wayシリンジの空気量を設定します。

低速ハンドピースの回転数を設定します。

高速ハンドピースの回転数を設定します。

超音波スケーラの出力を設定します。



3wayシリンジの水量を設定します。


低速ハンドピースの水量を設定します。

高速ハンドピースの水量を設定します。

超音波スケーラの水量を設定します。


バキューム

付属のノズルを取り付けてください。ホルダから外すと自動的に吸引を開始します。

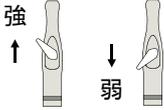

3Wayシリンジ

シリンジノズルを取り付けてください。ボタンを押すと、水、空気がでます。同時に押すと霧状に出すことができます。

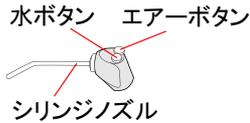

低速ハンドピース用コネクタ

低速ハンドピースを取り付けてください。主に歯面の清掃、研磨に使用します。


高速ハンドピース用コネクタ

エアタービンを取り付けてください。主に歯牙の切削に使用します。


超音波スケーラ

スケーラハンドピースを取り付けてください。チップは付属のトルクレンチを使って取り付けてください。

それぞれのハンドピースはホースで本体と接続しています。

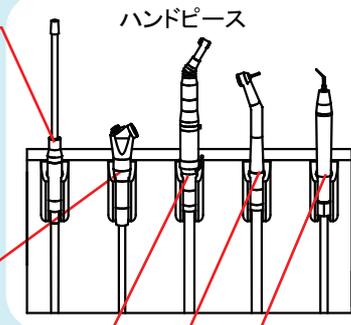

本体

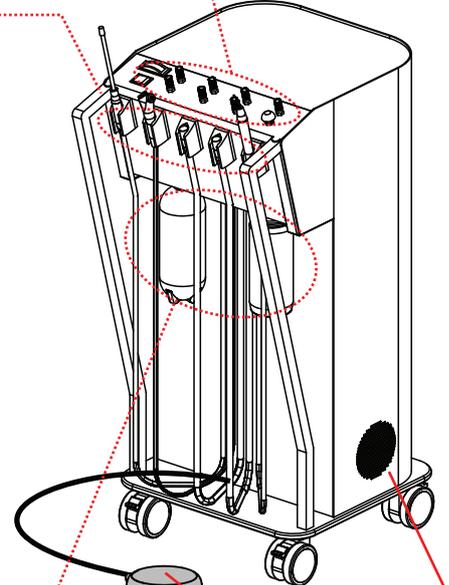

吸気穴


冷却用の空気を取り込みます

フットスイッチ

足で踏んで操作します。高速及び低速ハンドピース、超音波スケーラの操作を行います。

給水スイッチ

ONで給水ボトルから水が供給されます。給水ボトルを外すときは、OFFにしてください。

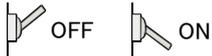

給水ボトル

各ハンドピースに水を供給します。ボトルに水を半分以上入れてください。


 ボトル内に給水フィルタがあります

ドレインスイッチ

使用後に、レバーを上げてタンク内の空気及び水を抜きます。



ボトル部分

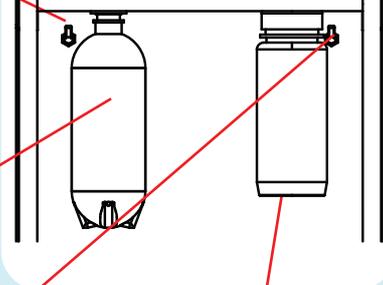


排水ボトル

バキュームで吸引した水を溜めます。空のボトルを取り付けてください。

 ボトル内にフロートスイッチがあります

背面

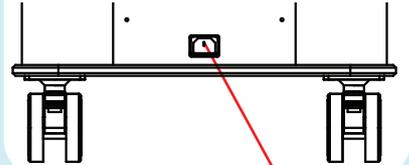

AC電源インレット

電源コードを接続します。片側はコンセントに差し込んでください。




ご使用後のお手入れ

製品を安全にお使いいただくため、ご使用後にはお手入れを行ってください。


1. バキュームラインのお手入れ (毎日)

A. バキュームラインの洗浄

バキュームで水を500ml吸引します。

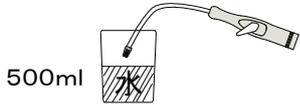

排水ボトルの汚水を捨てて、洗浄します。
フロートスイッチを洗浄します。

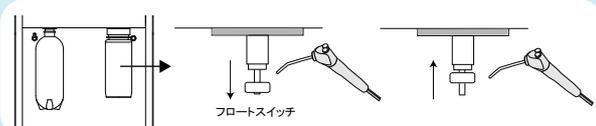


2. 水抜き (毎日)

A. 水抜き


給水ボトルを空にします。

ハンドピースに残った水をすべて抜きます。

空の給水ボトルを取り付けて、
給水スイッチをONにしてください。
電源スイッチをONにしてください。

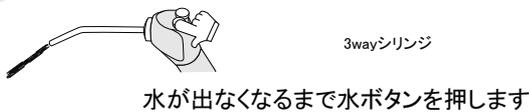

3wayシリンジ
水が出なくなるまで水ボタンを押します

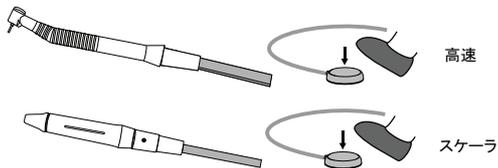


高速、スクーラのハンドピースを手で持ち、
水が出なくなるまでフィットスイッチを踏みます
1つずつ順に水抜きします


3. ハンドピースのお手入れ (毎処置)

A. 高速ハンドピースへ注油

高速ハンドピースを本体から取り外します。

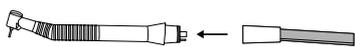

洗浄スプレーにチップノズルを装着します。
ホース装着部に洗浄スプレーを押し付け、ヘッドから
汚れたオイルが出るまでスプレーします。

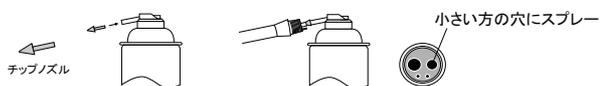


B. 低速ハンドピースへ注油


低速ハンドピースを本体から取り外します。
ポリッシングブラシまたはラバーカップも取り外します。




プロフィーアングルとエアーマーターの2部品に分けます。

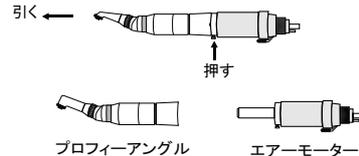


洗浄スプレーにチップノズルを装着します。
エアーマーターのホース装着部に洗浄スプレーを押し付け、
先端から汚れたオイルが出るまでスプレーします。

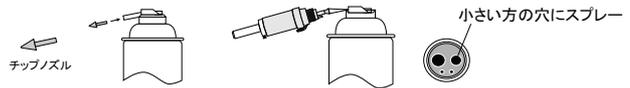

プロフィーアングルのエアーマーター連結部からスプレーします。

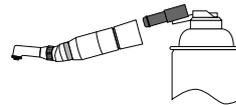


プロフィーアングルの中央部の袋ナットを回し、
ヘッド、回転軸、本体の3つに分解します。

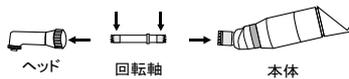

ヘッドの内部、回転軸の左右、本体の内部へ、矢印の箇所にスプレーします。

C. 超音波スクーラハンドピース及びスクーラコネクタの洗浄

電源スイッチをOFFにし、電源コードをコンセントから抜いてください。
ハンドピースを本体から取り外します。

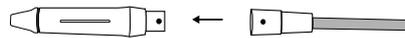

3-Wayシリンジのスプレーでコネクタに着いた汚れを落としてください。
汚れが落ちにくい場合は、柔らかいブラシで優しく磨いてください。




洗浄後しっかりと水分をとってください。

4、最後に (毎日)

A、本体の空気抜き

電源スイッチをOFFにして、
ドレインスイッチのレバーを上げてください。

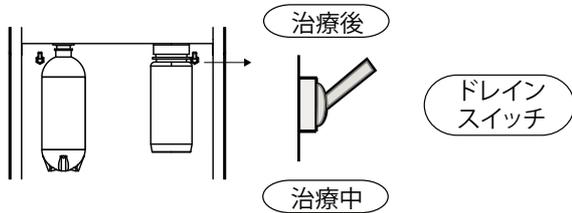


本体の下部から床に排気します。
「ぷしゅー」という空気が抜ける大きな音がします。

空気が出なくなることを確認します。

B、本体の清掃


本体とコンセントから、電源ケーブルを抜きます。
本体の表面を清掃します。
本体の左右にある冷却用吸気穴の埃を取り除きます。

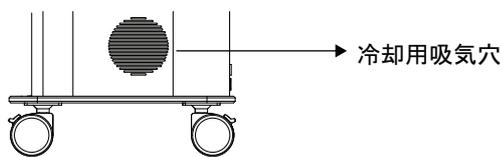



5、給水ラインのお手入れ (3ヶ月)

A、給水ラインの洗浄

ハンドピース、ノズルを本体から取り外します。

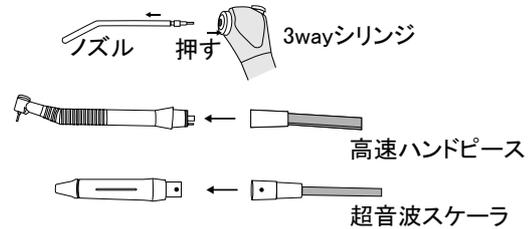

クエン酸水(電気ポットの洗浄に使用する濃度)を
給水ボトルに約半分入れ、各ハンドピースから10
秒以上水を出して、10~20分放置します。
その後、通常の水で各ハンドピースそれぞれ給水
ボトル1本分の水でクエン酸水と汚れを流します。
流し終わったら「2、水抜き」の手順を行って下さい。

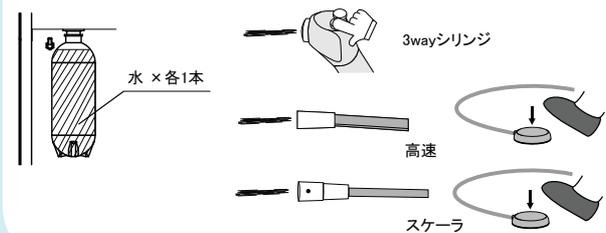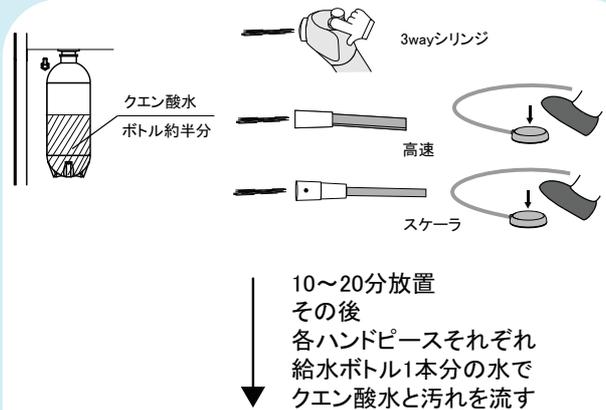

本資料は、製品の取り扱い、お手入れについての簡易説明書です。
取扱説明書に詳細が記載されていますので、必ず良くお読みになった上で、ご使用ください。
高速ハンドピース、低速ハンドピースについては、お使いのメーカーの取扱説明書をお読みください。