

# どこでも使える簡易型ヘッドライト キャリーライト 取扱説明書


※本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

このたびはキャリーライトをお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前には、必ずこの説明書を最後までお読みいただき、本器の取り扱い方法を十分ご理解の上、ご愛用ください。

なおこの説明書は大切に保管いただくよう、お願い申し上げます。

## ■各部の名称と操作

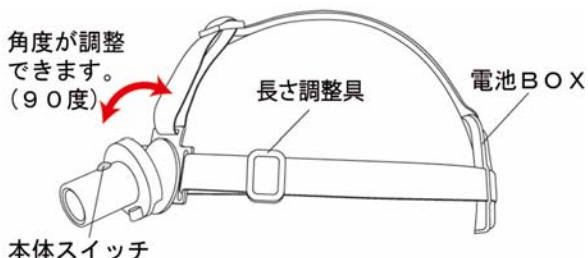


- ◆ベルトを調整して頭の大きさに合わせてください。
- ◆ライト部には角度調整機能がついています（最大90度）。
- ◆本体スイッチを1回押すと点灯し、再度押すと消灯します。

付属品：アクリル製 遮光板



- ◆照射範囲を狭めることができます。お好みによりご使用ください。
- 1. 表面のキズ防止用シートをはがします。
- 2. 裏面のシートをはがし、ライトの照射部分に貼り付けてください。

## ■バッテリーユニットの交換

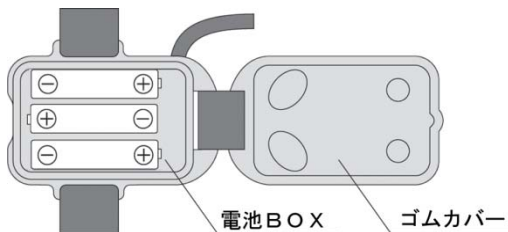

1. 電池BOXのゴムカバーを開きます。
  2. 電池の＋極を確認して、単4形乾電池3本を図のようにセットしてください。
- ※乾電池は別売です。
- ※乾電池が発熱、液漏れ、破損する恐れがありますので、＋方向は必ず正しくセットしてください。

## ■メンテナンス

- ◆ヘッドランプが汚れていないこと、濡れていないことを使用前後と保管前にご確認ください。
- ◆熱を加えないでください。
- ◆バンドの汚れは中性洗剤を使用して水洗いしてください。
- ◆ライト本体部は湿った布で表面を拭き取り、自然乾燥させてください。

## ■使用上の注意

- ◆ライトを直接見つめたり、他人の目を照らしたりしないよう、ご注意ください。瞳にダメージを与えるおそれがあります。
- ◆本体スイッチは上からまっすぐに押してください。斜めから押した場合、スイッチ部分が取れる場合があります。スイッチ部分の紛失は、保障対象外となります。

## ■トラブルシューティング 正常に作動しない場合

- ◆電池の向きを確認してください。
  - ◆電池を交換してください。
  - ◆接点のさびや汚れを点検し、必要な場合はさびや汚れを落としてください。
  - ◆スイッチをしっかりと押してください。
- 以上の点をご確認しても正常に作動しない場合は、裏面の宛先までご相談ください。

## ■保障規定

---

- ご購入いただいてから1年間、第一購入者に限り、品質もしくは製造上の欠陥が見つかった場合にのみ無償交換致します。
- 交換の際は、ご購入およびご購入日が証明できる書類（納品書・請求書等）をご用意ください。
- 保障期間内であっても次の場合は有料対応の対象となります。
  - 保証書をご提示されないとき。
  - 保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えたもの及び販売店名の表示がないとき。
  - 火災、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - お買い上げ後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適切なために生じた故障及び損傷。
  - 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取り扱いによって発生した故障及び損傷。
  - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。
- 無償交換をこの保障における責務の上限とし、補償期間の満了とともに、その責務も終了するものとします。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only Japan.

## ■製品仕様

---

電源：単4形乾電池3本（別売） 点灯方式：LEDライト 照射時間：10時間連続使用可能

外形寸法：ライト／47×52×50（mm） 電池BOX／70×57×23（mm）

質量：約115g（電池込） おもな材質：ABS樹脂