


パイオキュアー（P-11）点検方法 1/4

■事前にご用意ください


- ・パイオキュアー
- ・AC電源、充電電池

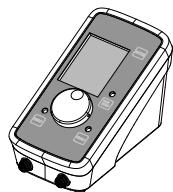

- ・電極コード




- ・日頃お使いの接続コードやアタッチメント類、フッ化ナトリウム液ネオ

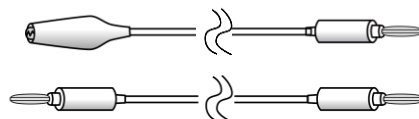

※別途、金属製のピンセットをご準備ください（製品には付属されておりません）

- ① 電極コードを**CH1**にセットしてください。
- ② 電源をONにしてください。

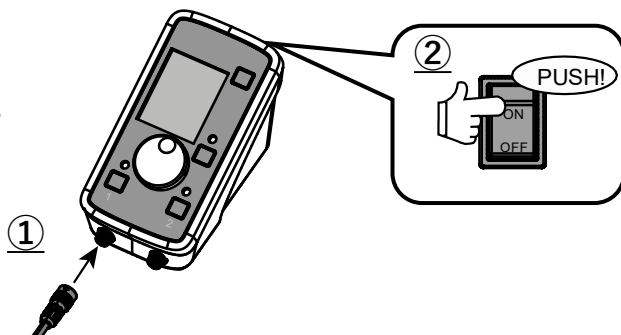

電源がつかない場合

- AC電源コードでご使用されている場合は、接続を改めてご確認ください。
 - ・充電電池に替えてご確認ください。
 - ・充電電池に替えてご使用できる場合は、AC電源コードの故障の疑いがございします。AC電源は消耗品です。販売店様へご発注をお願いします。
- 充電電池でご使用されている場合は、充電後に再度お試しください。


○ 液晶画面が表示された



✕ 解決しない場合

故障の疑いがあります。
販売店様、またはナルコム営業部へ
ご連絡ください。

- ③ MODEを押して「メモリ1」にセットしてください。
- ④ START/STOP スイッチをONにし、点灯をご確認ください。

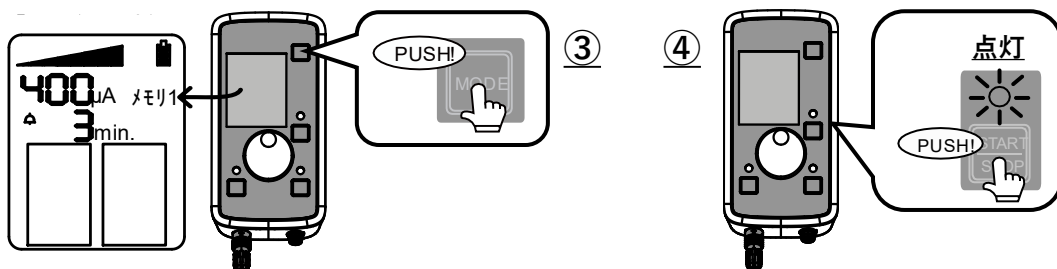


○ 点灯した



✕ 点灯しない場合


故障の疑いがあります。
販売店様、またはナルコム営業部へ
ご連絡ください。

- ⑤電極コード側面の金属部分と、電極下面の金属ジャック部分を
ピンセットで接触させてください。
接触した状態で本体のRESET LEDと電極のLEDが青点滅していることを確認してください。

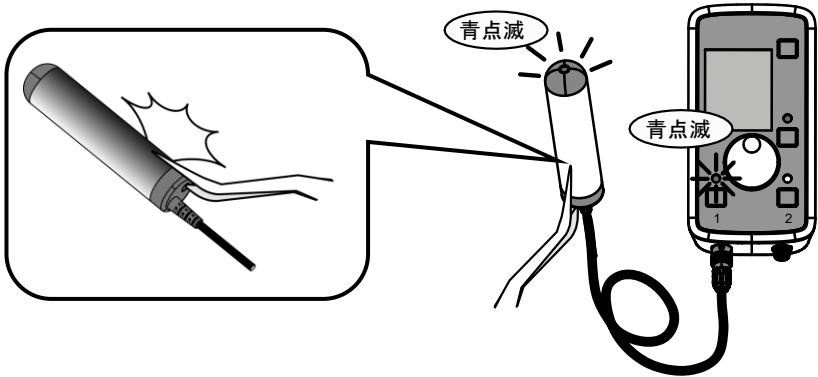

○ 点滅した

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本体は正常です。
続いて、接続コードの通
電チェックを行います。



！ 点滅しない場合

本体と電極コードの接続部CH1に
故障の可能性があります。
電極コードをCH2に差し替えて
①～⑤を再度お試しください。




症状	対応内容
本体RESET LED、電極LEDが 共に点滅した場合	本体のCH1関連部分に故障の可 能性があります。販売店様、または ナルコム営業部へご連絡くださ い。
本体RESET LEDが点滅し、 電極LEDが点滅しない場合	電極コードが断線している可能性 があります。電極を交換してくだ さい。
本体RESET LEDも電極のLED も点滅していない場合	本体故障の可能性、または電極 コードが断線している可能性があ ります。販売店様、またはナル コム営業部へご連絡ください。

パイオキュアー（P-11） 点検方法 3/4

⑥電極コードと日頃お使いの接続コード（PYO-F、もしくはPYO-G）を接続します。



⑦電極コードの金属部分と、接続コード（PYO-F、もしくはPYO-G）の端子部分を接触させます。
接触した状態で本体のRESET LEDと電極のLEDが青点滅していることを確認してください。

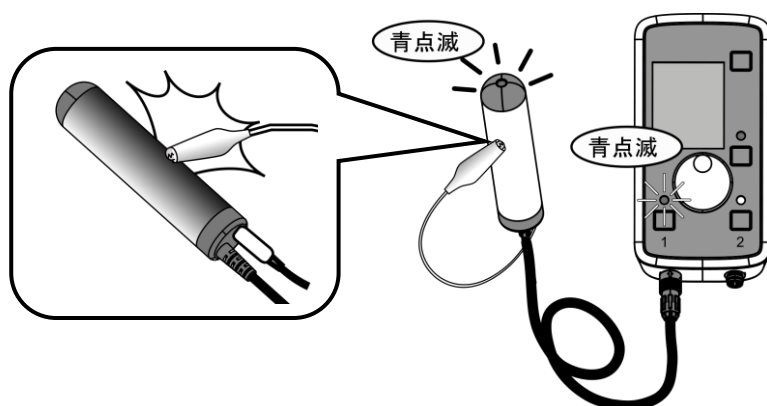


○ 点滅した

本体・接続コードは正常です。
続いて、アタッチメントのチェックを行います。

✕ 解決しない場合


接続コードに故障や断線の疑いがあります。接続コードは消耗品です。販売店様へご発注をお願いします。

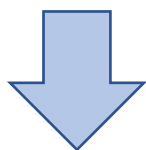



パイオキュアー（P-11） 点検方法 4/4

- ⑧ お使いのアタッチメントをご用意の上、PYO-Gに差し込みます。PYO-Gのもう一方は電極コードに差し込みます。

例：PYO-Aの場合

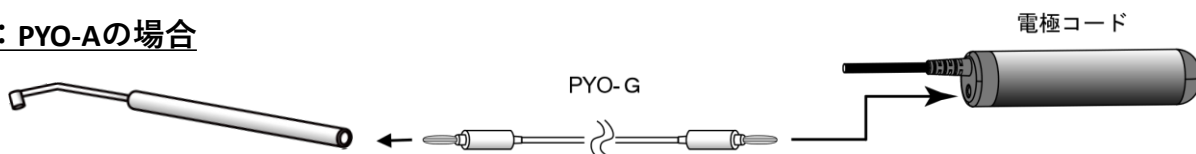


- ⑨ アタッチメントの先端にPYO-E（触子）を挿入し、フッ化ナトリウム液ネオを塗布してください。
⑩ 電極コードの金属部分と、PYO-Eを接触させます。
接触した状態で本体のRESET LEDと電極のLEDが青点滅していることを確認してください。

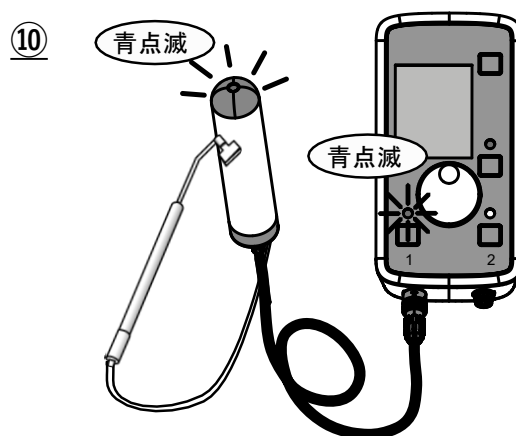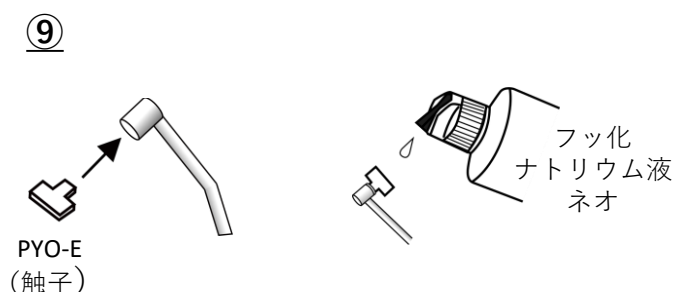

点滅した

製品の正常動作を確認できました。

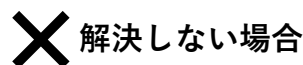

解決しない場合

アタッチメントに故障の疑いがあります。
アタッチメントは消耗品です。販売店様へご発注をお願いします。

■ ご使用の際のポイント

- 1：薬液の量を増やしてください。
薬液が少ないと、通電しにくい状況となります。
- 2：イオントレーや触子と歯牙の接触や、把持電極と手の接触が不十分な可能性があります。
把持電極をしっかり握っていただくと共に、触子を歯牙に確実に当ててください。
イオントレーをご使用の場合は、しっかりと噛んでいただくよう、患者さんにご指導ください。
- 3：患者さんの手を湿らせてください。
手が乾燥して通電しにくくなっている可能性があります。

※本体は、購入から1年間の保証期間があります（消耗品除く）。

※保証期間外の製品について、弊社に点検や修理依頼でお送りいただいた場合、修理の有無に関わらず基本点検料3,000円（税別）を頂戴します。