



# 達人プラスレイアウト追加手順書

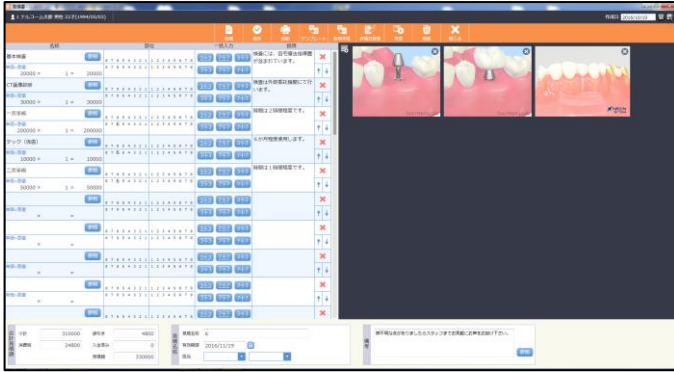


- ① 患者選択後、メニューから機能を選択して印刷ボタンを押します。  
※ホームページから追加する場合は手順③からご確認ください。



- ② レイアウト選択の画面で追加ボタンを押すとダウンロードのページへアクセスします。  
(インターネット接続環境が必要です)

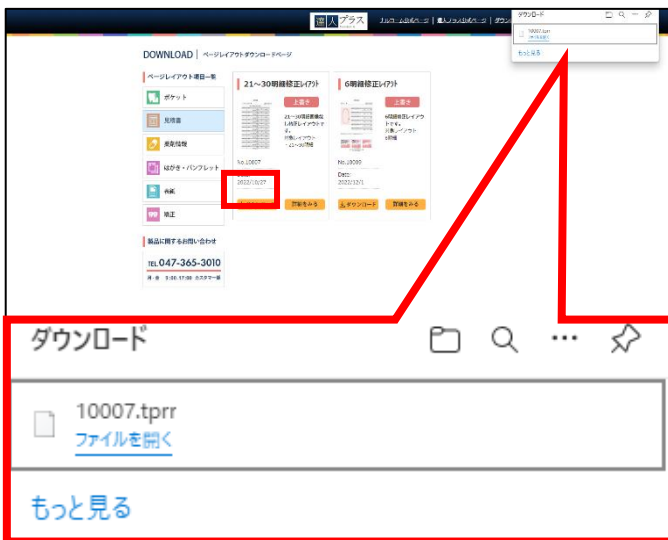

- ③ 追加したい機能をクリックしオレンジのダウンロードボタンを押します。  
【tpr】というファイルがダウンロードされるので、ファイルを開くをクリックします。

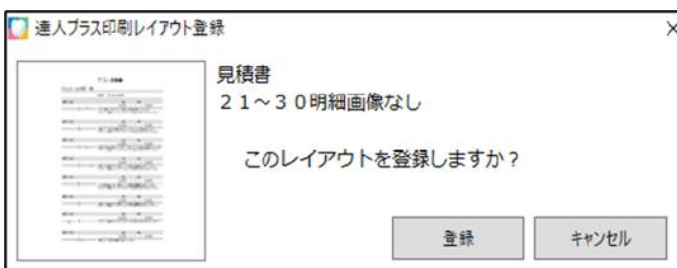


- ④ 達人プラス印刷レイアウト登録画面が出ます。  
登録ボタンをクリックすると達人プラスにレイアウトが追加されます。


登録画面が出ない場合は手順⑤をご確認ください。




- ⑤ このファイルを開く方法を選んでくださいの画面が表示されます。  
この PC で別のアプリを探すをクリックします。

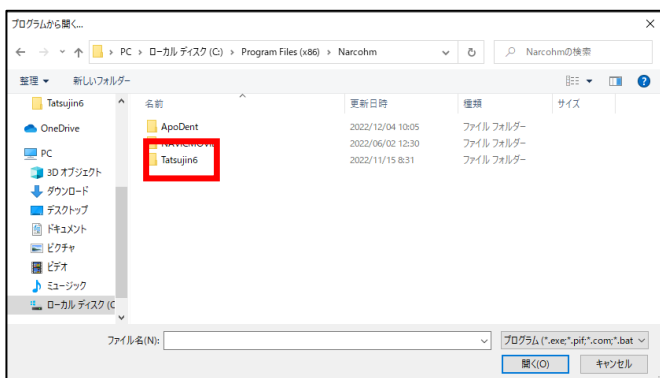

- ⑥ 開いた画面から Programfiles (x86) フォルダ→Narcohm フォルダ→Tatsujin6 フォルダへクリックして進みます。  
※Programfiles (x86) がない場合 Programfiles から進んでください。

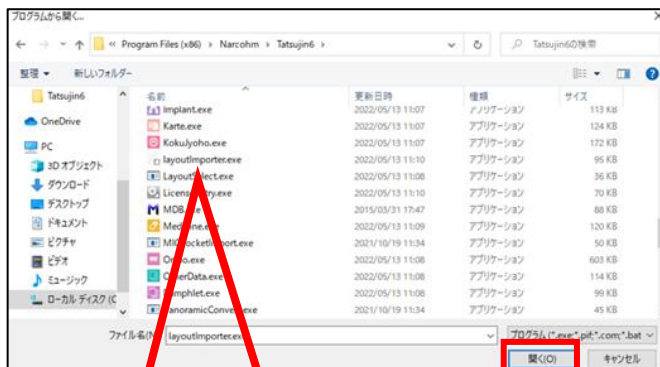

- ⑦ Tatsujin6 フォルダ内の layoutImporter.exe を選択した状態で右下の「開く」ボタンを押します。

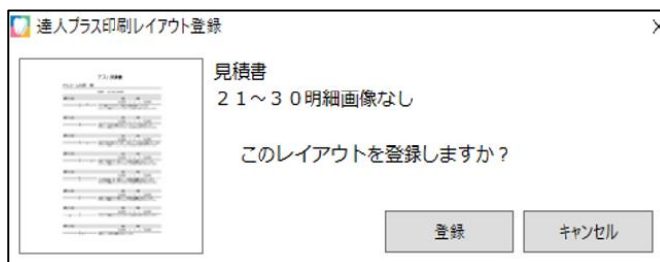

- ⑧ 達人プラス印刷レイアウト登録の画面がでます。  
「登録」ボタンをクリックすると達人プラスにレイアウトが追加されます。