

歯科材料 06 歯科用印象材料
 一般医療機器 歯科印象採得用器材 JMDN 70887000

アックスピン ストレート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

種類	ニッケル線径	植毛ナイロン繊維	長さ
赤	0.2 mm	0.5 mm	120 mm
緑	0.25 mm	0.5 mm	120 mm
黒	0.3 mm	0.5 mm	120 mm

2. 構造

φ0.2、φ0.25、φ0.3 mmニッケル線にナイロン繊維を電気植毛したものである。

3. 原理

本品に植毛されている親水性のフロッキーが寒天と絡まり、寒天の保持材となる。

【使用目的、効能又は効果】

1. 使用目的

寒天・連合印象における、ポスト印象採得の際に寒天のちぎれや歪みを防止するための、印象採得補強材です。

【品目仕様等】

1. 外観

曲がりがなく、汚れ剥げがなく、指定の色であること。

2. 寸法

芯線径が下記範囲内であること。

赤色：0.2±0.005 mm



緑色：0.25±0.005 mm

黒色：0.3±0.005 mm

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法


(1) ポスト孔の径に適したアックスピンストレートを選択します。

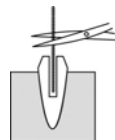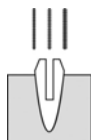


(2) ポスト孔の深さより少し長めにアックスピンストレートをカットします。




(3) 維持力を増すため先端を直角に曲げます。

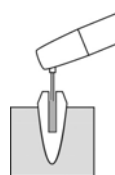

(4) ポスト孔にシリンジの針を奥まで挿入し、寒天を静かに注入しながら、気泡を残さないように針を抜き取ります。

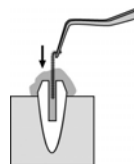

(5) 準備したアックスピンストレートをポスト孔に静かに挿入します。

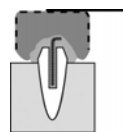

(6) アルジネートを盛ったトレーを静かに圧接して、印象材の硬化を待ちます。

【使用上の注意】

口腔内での取扱いについては十分に注意をして、落としたりしないでください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法

直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

【包装】

アソート 赤 7本+緑 7本+黒 6本 計 20本入
 赤・緑・青 各 20本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社ナルコム製作所

住 所：〒384-2107

長野県佐久市蓬田 1251-239

電 話 番 号：0267-51-5155 FAX 0267-58-0577

製 造 業 者：株式会社ナルコム製作所