

集団用フッ素イオン導入装置

フロリアート 10



10人同時にう蝕予防が出来きます。

トランク収納型で持ち運びに便利です。

自動回路によって電流値やタイマーの設定不要です。





全国の官公庁、教育委員会、保健所、歯科医院等でご愛顧頂いております。

フッ素イオン導入装置 フロリアート10

● 使用方法

- ① 適応するサイズのイオントレーに薬液(2%フッ化ナトリウム液)を浸潤させます。
- ② 口腔内にセットして付属のアタッチメントコードでフロリアート10と接続します。
- ③ 片顎各2分の処置をして終了です。

● イオントレー 電極と綿花が内装されたマウスピース型のトレーです。



サイズ	対 象	20 個入標準価格	100 個入標準価格
SS	乳・幼児向き	¥3,600	¥13,700
S	低学年向き	¥3,800	¥14,800
M	高学年・成人向き	¥4,200	¥15,900

● 2%フッ化ナトリウム液【 PYO-4A 】 安定度が高くイオン導入法に適しています。



承認番号 14200AMZ00018000

サイズ	型 番	標準価格
100ml	PYO-4A(小)	¥1,800
300ml	PYO-4A(大)	¥3,600

フロリアート10 標準価格：¥638,000

一般的名称：JMDN 70703000 歯科用イオン導入装置
 機器の分類：管理医療機器 特定保守管理医療機器
 承認番号：15200BZZ00601000

■仕様

型 式：F-10
 サ イ ズ：W250×D280×H140mm
 重 量：8kg
 定格電圧：100V 50/60Hz
 消費電力：15W

※標準価格(医院価格)は、2010年4月1日現在のものです。

※消費税は含まれておりません。

イオン導入法に関する文献を
 ご用意しています!!

ご希望の方は、弊社営業部まで
 お問い合わせ下さい。



フッ素イオン導入法って、 なに?

- ① 薬液であるフッ化ナトリウム溶液をイオン導入装置を使い、フッ素とナトリウムとに電気分解します。
- ② 単に塗るだけでは歯質に取り込まれにくいフッ素を一時的に人体を+の電位に変えて浸透しやすくさせます。
- ③ 歯質に取り込まれたフッ素はフルオロアパタイトを形成し虫歯を予防します。

本製品に関するお問い合わせ先

製造発売元

株式会社 ナルコム 製作所

E-mail: info@narcohm.co.jp

URL: http://www.narcohm.co.jp

本社・工場

〒384-2107 長野県佐久市蓬田1251-239

営業所

〒270-2253 千葉県松戸市日暮2-3-15 1F

TEL 047-311-3600 FAX 047-311-3133



MD518564 / ISO 13485:2003