

洗浄・除菌・抗菌  
がいちどにできる



# LEE BEN<sup>L</sup>

診療室用洗浄・除菌・抗菌クリーナー

診療室用洗浄・除菌・抗菌クリーナー「リーベンL」は診療室内の医療機器をはじめ設備機器類など広範囲にお使いいただけます。木・金属・プラスチック・ガラス・その他汚れに応じて原液～50倍程度に希釈した液を吹付け、布でふきとるだけで汚れを落とすと同時に診療室各箇所の細菌類・真菌類を除去することができ、また抗菌効果が得られます。

- 包装：スターターキット(スプレー、補充用500ml)補充ボトル(500ml)
- 成分：非イオン界面活性剤、抗菌剤、ポリエチレングリコール他
- 液性：弱アルカリ性
- 価格：スターターキット ¥3,500、補充ボトル ¥3,000

手肌にやさしい  
強力洗浄剤



# LEE BEN

診療室用洗浄剤

診療室用洗浄剤「リーベン」は、診療室内の医療機器をはじめ、設備機器類にいたる広範囲にお使いいただける親水性強力洗浄剤です。古くなって黄ばんだ汚れや錆でも、ピカピカに蘇らせ、清潔で快適な診療室を保持します。


- 包装：260g
- 成分：非イオン界面活性剤、脂肪酸、カルナバ、シリコン、溶剤
- 液性：中性
- 価格：¥3,500

# LEE BEN リーベン / 診療室用洗剤

- 特徴
- 医療機器に限らず、診療室内の設備機器などのあらゆる物に威力を発揮します。汚れを強力に落とすことは勿論、錆落とし、粘着面の糊落とし、じゅうたんなどのシミ抜きにもお使いいただけます。
  - 無臭性ですので、使用後にイヤな臭いが残りません。
  - 手肌にやさしく、荒れません。
  - 使用後、ベトツキが無くサラッと衛生的です。変色ありません。

■使用法  
スポンジ、布等に水を含ませ、堅くしぼってから本品を適量付けて、汚れている部分をこすってください。水分を嫌う物に対しては水を含ませずにご使用ください。汚れを落とした後、乾かない内に乾布で拭いてください。もし、乾いて白く残った時は、軽く水拭きしてください。

■用途  
医療用機器、診療室内設備機器、キャビネット、ビニールレザー、プラスチック製品、鏡、ガラス(車のフロントガラスの油膜取り、くもり止めにも可)、壁装材、床、家具、電化製品、その他。

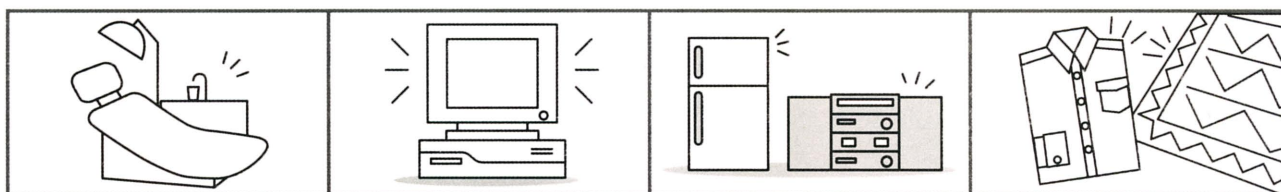

ユニットまわり及び、医療機器

OA機器(パソコン、複写機etc)

家具・調度品・電化製品

カッターシャツの衿・  
じゅうたん・カーペットのシミ抜き

# LEE BEN<sub>L</sub> リーベン<sub>L</sub> / 診療室用洗剤・除菌・抗菌クリーナー

■特徴  
木・金属・プラスチック・ガラス・その他 等用途および汚れの種類、程度に応じて原液～50倍程度に希釈し使用できます。  
汚れを落とすと同時に診療室各箇所の細菌類・真菌類を除去することができ、また抗菌効果が得られます。

■使用法  
木・金属・プラスチック・ガラス・その他汚れに応じて原液～50倍程度に希釈した液を吹付け、布でふきとるだけで細菌を除去することができます。

- 用途
- 原液～3倍 換気扇・台所まわりの油污等・タイル・ステンレス・白木の柱・ビニールレザー・デコラ板・化粧合板
  - 3倍～5倍 ユニットまわり・スチール製デスク・ロッカー・電化製品・プラスチック製品
  - 5倍～10倍 ニス塗り家具・畳・カーペット
  - 50倍以上 ガラス・鏡

## 殺菌効果試験結果

試験依頼先 財団法人日本食品分析センター  
試験成績書発行年月日 平成9年7月1日  
試験成績書発行番号 第497040104-001号

試験菌	希釈倍数	菌の生育の有無			
		2.5分後	5分後	10分後	15分後
大腸菌	原液	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
黄色ブドウ球菌	原液	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
サルモネラ	原液	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
	10	-	-	-	-

試験菌	希釈倍数	菌の生育の有無			
		2.5分後	5分後	10分後	15分後
緑膿菌	原液	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
	5	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
黒コウジカビ	原液	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
	5	+	+	-	-
	10	+	+	-	-
青カビ	原液	-	-	-	-
	2	+	-	-	-
	5	+	+	+	-
	10	+	+	-	-

本製品に関するお問い合わせ先

ナルコーム

〒270-2253 千葉県松戸市日暮 2-3-15 7F  
TEL 047-311-3600 FAX 047-311-3133  
URL <http://www.narcohm.co.jp> mail : [info@narcohm.co.jp](mailto:info@narcohm.co.jp)