



#### <プログラムの変更>

第9条 ナルコームは、予告なしに改良のために本ソフトウェアの変更を行うことがあります。旧バージョンを使用するお客様に対する修正版の配布は行いません。

#### <使用許諾の終了>

第10条 お客様が本契約の諸条件のいずれかの条項に違反したとき、またはナルコームの著作権その他の知的財産権を侵害したときは、ナルコームは使用許諾を解除し、お客様の本製品のご使用を中止させることができます。

本使用許諾が終了した場合、お客様は速やかにお客様のご負担で本製品をナルコームに返却または破棄していただくものとします。

#### <その他の事項>

第11条 本契約は、本契約締結以前に本ソフトウェアの使用条件に関連してお客様とナルコームとの間で交わされた全ての取り決めに優先して適用されます。

第12条 本契約書に定めのない事項及び、本契約書の解釈に疑義が生じた場合、ナルコームが当該事項の内容及び解釈を決定します。

第13条 本契約に関連する訴訟の第一審専属合意管轄裁判所は、松戸地方裁判所とします。

## インストール方法

- ① ダウンロードして頂きました中の **Setup.exe** を W クリックして下さい。
- ② インストールウィザード画面が表示されましたら **次へ** をクリックして下さい。
- ③ 同意を許可する画面が表示されますので **同意します** にチェックをして **次へ** をクリックして下さい。
- ④ **インストール** をクリックして下さい。
- ⑤ インストール中お待ち頂き、**完了** をクリックして下さい。

## 使用方法

スライドショーで再生出来る画像は JPEG のファイルのみです。

デンタルフォトフレームの画像を使用する場合には、一旦 SD カードや USB クリップメモリにソフト上から転送して頂く必要があります。

- ① デスクトップのスライドショーを W クリックして下さい。
- ② **参照** ボタンをクリックし、画像が保存されているフォルダを指定して下さい。
- ③ 画面右下スライドショーボタンをクリックし、スライドショーが始まります。
- ④ 終了する場合には、キーボードの ESC ボタンをクリックするか、マウスを W クリックして下さい。

#### <ボタン説明>

間 隔：次のスライドへの時間を変更します。

遅 延：遅い時と感じた場合には数字を少なく、早いと感じた場合には数字を増やして下さい。

ブロックサイズ：数字が少ないほどなめらかに動き、数字が多いほどカクカクとした動きになります。

エフェクト：なしに  をするとすぐに次のスライドへ変わります。

## サポートについて

本ソフトウェアについて、一切のサポートは致しません。

## 連絡先

**株式会社ナルコーム**

千葉県松戸市日暮 2-3-15-7F

<http://www.narcohm.co.jp>

[info@narcohm.co.jp](mailto:info@narcohm.co.jp)